

Bestellablauf mittels Bestellformular für FoundationOne® Services



Kontaktieren Sie bitte austria.foundationmedicine@roche.com, sollte keine FoundationOne **Versandbox** lagernd sein. Eine Versandbox für Gewebeproben kann ebenfalls vom Abhol-service mitgebracht werden, sofern das bei der Vereinbarung der Abholung angemerkt wird.



Die vom Patienten unterschriebene **Patienteneinwilligungs-erklärung** bleibt nach Aufklärung im Besitz des Arztes.

Das **Bestellformular** ist vollständig auszufüllen und an **+43 (1) 272 45 55 65** zu faxen oder per E-Mail an orderhandling@pharmacom.at zu übermitteln.



Nach erfolgreicher Bearbeitung Ihrer Bestellung erhalten Sie per E-Mail die Bestellbestätigung und das **Test Requisition Form (TRF)**. Bitte das TRF ausdrucken, unterschreiben und in die Versandbox legen. Bitte beachten Sie, dass das Datum im folgenden Format anzugeben ist: **MM/TT/JJJJ**.



Die **Probenvorbereitung** sollte entsprechend dem Probenleitfaden erfolgen. Die Probenleitfäden können auf der Foundation Medicine Website www.foundationmedicine.at unter **INFORMATIONSMATERIAL** heruntergeladen werden.

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf der Probe mit den Angaben auf dem TRF übereinstimmen.



Es wird empfohlen, die **Blutabnahme** und die Abholung am selben Tag und idealerweise zu Wochenbeginn zu planen. Ausschließlich die in der Versandbox inkludierten **Probenröhrchen** dürfen zur Blutabnahme verwendet werden. Diese müssen mit den zur Verfügung gestellten Aufklebern versehen werden und sind mit



**FOUNDATION
MEDICINE®**



den **patientenspezifischen Angaben** zu beschriften:

- Geburtsdatum (MM/TT/JJJJ)
- Bestellnummer (03-2021-000xxx)
- Datum der Probenentnahme (MM/TT/JJJJ)



Eingeschickte **FFPE Blöcke** werden nach erfolgter Berichtserstellung retourniert, sofern eine Rücksendeadresse angegeben wurde.



Vereinbaren Sie telefonisch unter **+43 (0) 50 229** oder per E-Mail an kundenservice@medlog.at einen **Abholtermin**. Bitte geben Sie folgende Informationen bekannt:

- Betreff der E-Mail: FMI oder Foundation Medicine
- Bestellnummer (03-2021-000xxx)
- Abholzeit und Abholort (Gebäude, Stock, Abteilung)
- Kontaktperson (inklusive Telefonnummer für Rückfragen)



Im **Bestellportal** wird der aktuelle Status der Testphase angezeigt. Der **Bericht** kann im **Bestellportal** auf der Foundation Medicine Website www.foundationmedicine.at unter **BESTELLEN** heruntergeladen werden. Zusätzlich werden Sie per E-Mail benachrichtigt, sobald der Bericht abrufbar ist. In der E-Mail ist ein Link enthalten, womit der Bericht heruntergeladen werden kann. Für beide Optionen ist eine einmalige Registrierung notwendig.

Sie haben weitere Fragen oder wollen eines unserer FoundationOne Services einsetzen?



www.foundationmedicine.at



+43-1-277 39-202



austria.foundationmedicine@roche.com