

# Bestellablauf

## Online Ordering für FoundationOne® Services



Kontaktieren Sie bitte [austria.foundationmedicine@roche.com](mailto:austria.foundationmedicine@roche.com), sollte keine FoundationOne **Versandbox** lagernd sein.

Eine Versandbox für Gewebeproben kann ebenfalls vom Abhol-service mitgebracht werden, sofern das bei der Vereinbarung der Abholung angemerkt wird.



Die vom Patienten unterschriebene **Patienteneinwilligungs-erklärung** bleibt nach Aufklärung im Besitz des Arztes.

Das **Bestellportal** befindet sich auf der Foundation Medicine Website [www.foundationmedicine.at](http://www.foundationmedicine.at). Klicken Sie auf **BESTELLEN**, um eine Bestellung aufzugeben. Bei Erstbestellern ist eine einmalige RoDIP Registrierung notwendig.



Nach erfolgreichem Bestellen kann das **Test Requisition Form (TRF)** im Bestellportal abgerufen und heruntergeladen werden. Zusätzlich erhalten Sie per E-Mail das TRF und eine Bestellbestätigung. Bitte das TRF ausdrucken, unterschreiben und in die Versandbox legen.



Die **Probenvorbereitung** sollte entsprechend dem Probenleitfaden erfolgen. Die Probenleitfäden können auf der Foundation Medicine Website [www.foundationmedicine.at](http://www.foundationmedicine.at) unter **INFORMATIONSMATERIAL** heruntergeladen werden.

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf der Probe mit den Angaben auf dem TRF übereinstimmen.



Es wird empfohlen, die **Blutabnahme** und die Abholung am selben Tag und idealerweise zu Wochenbeginn zu planen. Ausschließlich die in der Versandbox inkludierten **Probenröhrchen** dürfen zur Blutabnahme verwendet werden. Diese müssen mit den zur



**FOUNDATION  
MEDICINE®**



Verfügung gestellten Aufklebern versehen werden und sind mit den **patientenspezifischen Angaben** zu beschriften:

- Geburtsdatum (MM/TT/JJJJ)
- Bestellnummer (03-2021-000xxx)
- Datum der Probenentnahme (MM/TT/JJJJ)



Eingeschickte **FFPE Blöcke** werden nach erfolgter Berichtserstellung retourniert, sofern eine Rücksendeadresse angegeben wurde.



Vereinbaren Sie telefonisch unter **+43 (0) 50 229** oder per E-Mail an **kundenservice@medlog.at** einen **Abholtermin**. Bitte geben Sie folgende Informationen bekannt:

- Betreff der E-Mail: FMI oder Foundation Medicine
- Bestellnummer (03-2021-000xxx)
- Abholzeit und Abholort (Gebäude, Stock, Abteilung)
- Kontaktperson (inklusive Telefonnummer für Rückfragen)



Im **Bestellportal** wird der aktuelle Status der Testphase angezeigt. Der **Bericht** ist anschließend im **Bestellportal** abrufbar. Sie erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Bericht erstellt wurde.

**Sie haben weitere Fragen oder wollen eines unserer FoundationOne Services einsetzen?**



[www.foundationmedicine.at](http://www.foundationmedicine.at)



+43-1-277 39-202



[austria.foundationmedicine@roche.com](mailto:austria.foundationmedicine@roche.com)